



Käyttöohje:

Poista visiiristä suojamuovit sekä sisä- että ulkopuolelta. Suosittelemme välttämään visiirin turhaa koskettelua käytön aikana. Muistathan puhdistaa kasvovisiirin aina ennen ja jälkeen käytön. Mikäli visiiri osa naarmuuntuu tai vahingoittuu muuten, suosittelemme sen vaihtamista uuteen. Kasvovisiirin voit säätää itsellesi sopivaksi siirtämällä nepparin paikkaa kuminauhassa.

Hoito-ohje:

Kasvovisiirimme on uudelleenkäytettävä ja on helppo myös puhdistaa. Puhdistus miedolla fairy vedellä ja pehmeällä liinalla, kotisivuiltamme (lasilinkki.fi/lisasuojat) löydät tarkan taulukon kautta lisätiedot siitä, mitä puhdistusaineita pc-materiaali kestää. Kasvosuojaimen pehmuste osan voi myös pestä desinfiointiaineella tai saippuavedellä pehmeää liinaa käyttäen. Otsapannassa olevan neopreeninauhan puhdistus vain desinfiomalla esim. pyyhpaperia käyttäen, neopreeni ei kestä hirmu hyvin vesipesua. Visiiri ei kestä vesipesua raanan alla, sillä liian runsas veden käyttö saattaa aiheuttaa veden menemisen liimauksen väliin, jolloin liimaus heikentyy.

Visiiri on kestävä, mutta pehmeät osat kuluvat nopeammin, jolloin uudelleen käyttökerrat vaihtelevat käytön kuluttavuuden mukaan. Kasvovisiirit tulee kuitenkin vaihtaa aika ajoin uusiin, sillä niitä ei ole suunniteltu kestävään kuukausia, koska kyse on hygieniatuotteesta. Toki kesto riippuu käytön ja puhdistuksen kuluttavuudesta/toistuvuudesta esim., jos visiiri puhdistetaan monta kertaa päivän aikana ja työ on hiostavaa.

Mikäli teillä tulee jotain lisäkysyttävää tilaamisesta, tuotteesta tai olisitte kiinnostuneita muista lisäsuojistamme niin voitte olla meihin yhteydessä joko puhelimitse ma-pe 7.30-16.30 017 2833100 tai sähköpostitse lasilinkki@lasilinkki.fi

Ystävällisin terveisin,

Lasilinkki Oy
Yrittäjätie 5
70150 Kuopio
017 283 3100
lasilinkki@lasilinkki.fi

Kasvovisiirimme ei ole CE-merkitty. Suosittelemme yhä huolehtimaan etäisyyksistä ja hyvästä käsihygieniasta.